


PROCÉDURE *i*-CHROMA™ FERRITIN

1. Sortez le **Buffer de Détection** du réfrigérateur et laissez-le à température ambiante pendant quelques minutes.




2. Pipetez **30 µL de sérum/plasma** et ajoutez-le au tube contenant le Buffer de Détection.

Mélangez bien (10 sec max.)

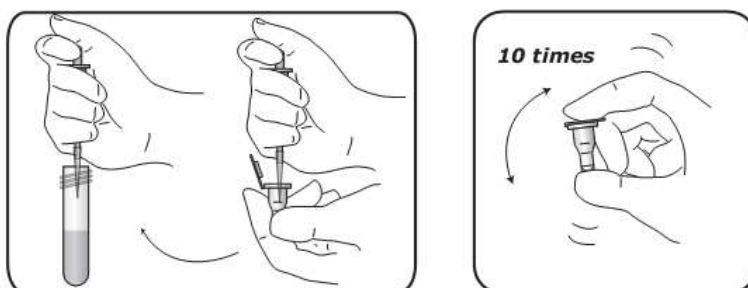

3. Prenez **75 µL du mélange** et mettez-le dans le puits du test.

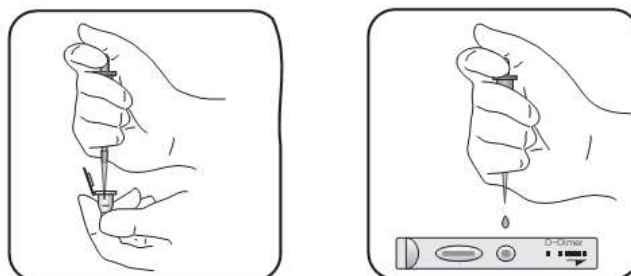

4. Insérez le test dans le chargeur du ***i*-CHROMA™** et Appuyez sur **select**

