


PROCÉDURE *i*-CHROMA™ TSH


1. Sortez le **Buffer de Détection** du réfrigérateur et laissez-le à température ambiante pendant quelques minutes.



2. Pipetez **2x75 µL de sérum/plasma** (pipette verte) et ajoutez-le au tube fournis dans le kit

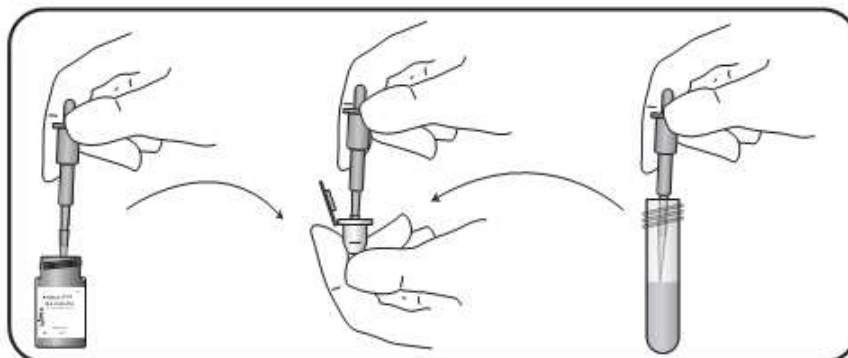

3. Pipetez **75 µL de Buffer de Détection** et ajoutez-le au tube contenant le sérum (Mélangez bien, 10 sec. max.)

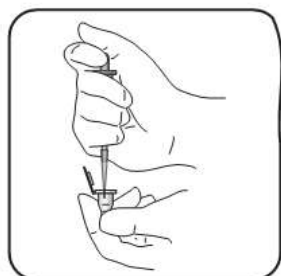

4. Prenez **75 µL du mélange** et mettez-le dans le puits du test.

5. Insérez le test dans le chargeur du ***i*-CHROMA™** et Appuyer sur **select**

