


PROCÉDURE *i*-CHROMA™ β HCG

1. Sortez le **Buffer de Détection** du réfrigérateur et laissez-le à température ambiante pendant quelques minutes.




2. Pipetez **30 μ L de sérum/plasma ou 50 μ L de sang complet** et ajoutez-le au tube contenant le Buffer de Détection.

Mélangez bien (10 sec max.)

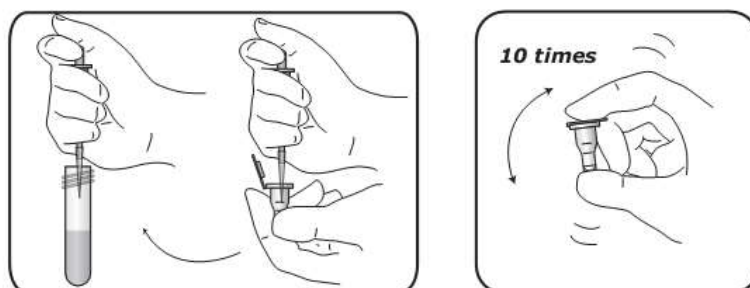

3. Prenez **75 μ L du mélange** et mettez-le dans le puits du test.

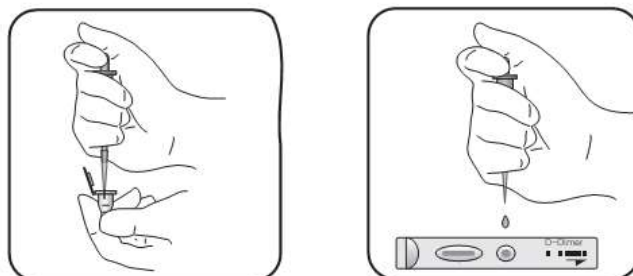

4. Insérez le test dans le chargeur du ***i*-CHROMA™** et Appuyer sur **select** (résultat après 15 min. d'incubation)

