

Hemochroma+


Mode d'emploi



1. Allumer l'hemochroma+
2. L'appareil affiche « System OK »
3. Introduire la puce ID arrivée avec le lot de réactif utilisé
4. Déposer le sang du patient sur la cuvette



Goutte du doigt ou
pipette (15µl)

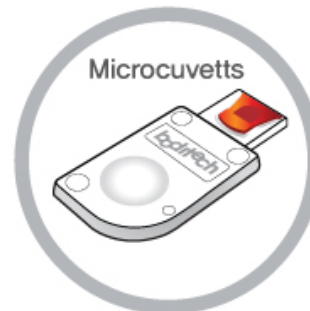

Vérifier que le sang est bien réparti
sur l'extrémité de la cuvette

5. Ouvrir la trappe sur le flan droit de l'appareil
6. Déposer la cuvette en respectant le sens



7. Fermer la trappe, l'analyse commence automatiquement
8. Après 3s, lire le résultat du taux d'hémoglobine (g/dL) et d'hématocrite (%)

Valeurs seuils

Paramètres	Hemoglobine (g/dL)	Hematocrite (%)
Homme	14 à 18	40-52
Femme	12 à 16	37-46
Enfant	11 à 13	36-44
Bébé 1 semaine	15 à 20	47-65
Nouveau-né	17 à 22	54-68

Source : Guide pratique des analyses médicales, P.Dieussaert, 6^e Ed. p.887